

## Ergänzung zu der derzeit gültigen Gebrauchsanweisung

### **Zoll Medical Inc. schliesst eine "Sicherheitstechnische Kontrolle" für den AED Pro im automatischen Modus nach Betreiberverordnung aus.**

Der Ausschluss ist damit begründet, dass der AED Pro spezielle automatische Testprogramme alle 7 Tage/oder öfter durchführt. Alle Elemente, die für die Sicherheit der Funktion des Defibrillators im automatischen Modus relevant sind, werden in diesem Testprogramm durchgeführt. In einem erkannten Fehlerfall gibt das Gerät Alarm.

Bei der Entwicklung wurde grundsätzlich die Robustheit und die Benutzerfreundlichkeit in den Vordergrund gestellt. Durch umfangreiche elektronische und mechanische Prüfungen wurde dieses Entwicklungsziel nachgewiesen.

Technische Geräte sind jedoch grundsätzlich mittels Routinekontrollen durch den Anwender auf Ihren Funktionsstatus zu überwachen. Die Gebrauchsanweisung gibt hierüber unter „Wartung“ Empfehlungen.

Hinweis zur Betreiberverordnung für den AED Pro Defibrillator: Diese Schreiben ist eine Ergänzung zu der derzeit gültigen Gebrauchsanweisung.

### **!!Gilt nicht für Geräte die ausschließlich im „Manuellen Modus“ arbeiten!!**

*Der AED Pro Defibrillator im manuellen Modus unterliegt § 6 Betreiberverordnung und damit einer regelmäßigen „Sicherheitstechnischen Kontrolle“*

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen

*Ihr*

*ZOLL AED Team*

Feb. 2007