

Ambu® patentiertes Hygienesystem



Die wichtigsten Vorteile

- Schutz vor Kreuzinfektionen
- Eine aufwändige Innenreinigung ist nicht notwendig
- Passend für Ambu Man, Ambu Defib Trainer und Ambu SAM

Ambu® patentiertes Hygienesystem

Das patentierte und geschlossene Hygienesystem verhindert Kreuzinfektionen, sorgt für realistische Atemwegswiderstände und eine Expiration durch Mund und Nase – der natürliche Weg.

Ambu Gesichtsmaske & Gesichtsmaske Ambu Baby

Die Ambu Gesichtsmasken werden einfach und sicher am Kopf des Trainingsgeräts befestigt und können für die Mund-zu-Mund, Mund-zu-Nase und Beutel-Masken-Beatmung eingesetzt werden. Sie sind wiederverwendbar und werden nach dem Training einfach desinfiziert und gewaschen.

Ambu Guedelgesichtsmaske

Neben der normalen Beatmung ist es möglich, mit einer 180°-Drehung einen Guedeltubus zu platzieren. Auch sie sind wiederverwendbar und werden nach dem Training einfach desinfiziert und gewaschen.

Ambu Einweg-Luftbeutel

Die Einweg-Luftbeutel fangen die Atemspende auf, verdrängen die im Kopf des Trainingsgeräts vorhandene Luft und ermöglichen dadurch ein sichtbares Heben des Brustkorbs. Nach dem Training werden sie einfach entsorgt.

Bestell-Informationen

Artikel-Nummer	Artikelbezeichnung
234 000 703	Ambu Gesichtsmasken für Ambu Man I, C, W Defib Trainer System W, SAM
234 000 725	Ambu Guedel Gesichtsmasken für Ambu Man I, C, W, Defib Trainer System W, SAM
234 000 256	Ambu Gesichtsmasken für Ambu Baby
234 000 702	Ambu Einweg-Luftbeutel für Ambu Man I und W, Defib Trainer System W, SAM
256 000 702	Ambu Einweg-Luftbeutel für Ambu Baby



Guedel Gesichtsmaske

Ambu Hygiene System

Unser patentiertes Hygienesystem schützt Ihre Teilnehmer zuverlässig vor Kreuzinfektionen. Zudem erübrigt das System eine aufwendige Innenreinigung Ihres Trainingsgerätes.

Einweg-Luftbeutel und desinfizierbare Gesichtsmasken

Vor Beginn des Trainings erhält jeder Teilnehmer seine eigene Gesichtsmaske mit dazugehörigem Einweg-Luftbeutel. Der Luftbeutel wird unter der Gesichtsmaske im Kopfrinnen des Trainingsgerätes platziert, wodurch ein geschlossenes System entsteht. So wird gewährleistet, dass die Kursteilnehmer bei der Beatmung nicht mit fremden Keimen in Kontakt kommen.

Weniger Arbeit bei Vor- und Nachbereitung der Kurse

Da Keime nicht in das Innere des Gerätes gelangen können, müssen Sie dieses auch nicht von innen reinigen. Lediglich die wiederverwendbare Gesichtsmaske muss nach jedem Training neu aufbereitet werden. Das spart Arbeit, Zeit und Kosten und Sie können sich auf das Wesentliche konzentrieren: die Konzepte, Lehrinhalte und auf das Training selbst.




Mund-zu-Nase Beatmung



Mund-zu-Mund Beatmung
Ambu Baby


Beatmung

Wird das Trainingsgerät durch Mund oder Nase der Gesichtsmaske (rot) beatmet, füllt sich der Einweg-Luftbeutel (grün). Die dort verdrängte Luft strömt in das Trainingsgerät und füllt die Lungen/ den Magen.

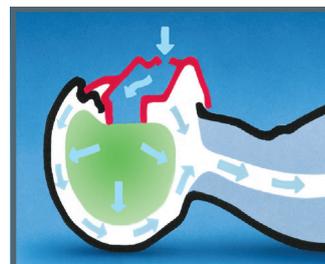

Ausatmung

Nach Beendigung der Ventilation strömt die Luft in den Kopf zurück und der Luftbeutel zieht sich zusammen. Die vom Kursteilnehmer eingeblasene Luft wird durch Mund und Nase wieder ausgestoßen.

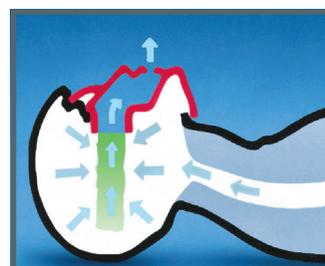

Ambu A/S

Baltorpbakken 13
DK-2750 Ballerup
Denmark
Tel. +45 72 25 20 00
Fax +45 72 25 20 50
www.ambu.com

Ambu GmbH

In der Hub 5
D-61231 Bad Nauheim
Tel. 06032 9250-0
Fax 06032 9250-200
www.ambu.de