



Anwendungshinweise: Ladevorgang




Safecare
MEDICAL

REF 700101 Typ B | SafeTemp Ohrthermometer Schutzkappen

1. Entnahmebox mit 20 Schutzkappen entlang der Perforation öffnen.
2. Entnahmebox in Ladestation einsetzen.
3. Die Messspitze in die Packung drücken um eine neue Schutzkappe aufzusetzen.
4. Dabei sicherstellen, dass hinreichend Druck angewendet wird um einen festen Sitz der Schutzkappen durch Einrasten auf der Messspitze zu gewährleisten.
5. Nach erfolgter Messung die gebrauchte Schutzkappe entsorgen. Hierbei sollte der Abwurf direkt über dem Abwurfbehälter erfolgen.

1.

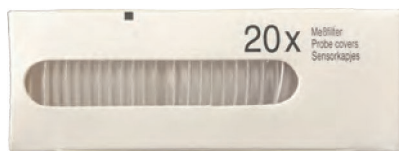

1.



2.



3.



4.



5.



Hinweis: Produktspezifisch ist zu beachten, dass beim Aufsetzen der SafeTemp Schutzkappen durch Drücken der Messspitze in die Entnahmepackung, der Schutzkappen-Stapel etwas nachgeben kann (vgl. Bild 3/4). Im Vergleich zum Produkt vom Originalhersteller ist daher ein etwas höherer Druck erforderlich um die Schutzkappen festsitzend aufzubringen.



Safecare Medical GmbH | Alstr. 97 | 41063 Mönchengladbach | Germany
Kundenservice: care@safecaremed.de