



## Bacillo<sup>®</sup> Zero Tissues

**Auf organischen Säuren basierende, umfangreich wirksame und materialschonende Reinigungs- und Desinfektionstücher.**



CE 0482

### Produkteigenschaften

- 100 % plastikfreies Vliestuchmaterial
- Viruzid in 2 Minuten
- Frei von Alkoholen, quartären Ammoniumverbindungen, Peroxiden und von Parfüm- und Farbstoffen
- > 98,5 % organische Inhaltsstoffe
- Patentierte Formulierung – organic acid complex
- Keine Gefahrstoffkennzeichnung – ohne Handschuhe anwendbar\*
- Sehr gute Materialverträglichkeit

### Anwendungsgebiete / Zweckbestimmung

Reinigende Desinfektion von nicht invasiven Medizinprodukten. Reinigende Desinfektion von invasiven Medizinprodukten, nicht jedoch als letzter Schritt der Aufbereitung.

Bacillo<sup>®</sup> Zero Tissues eignen sich zur unkomplizierten materialschonenden Schnelldesinfektion von:

### Flächen gem. Biozidproduktregistrierung (BPR), wie:

- Displays und Tastaturen bzw. Bedienfelder empfindlicher Kommunikationsgeräte, z.B. Mobiltelefone, Computer
- empfindliche Oberflächen – z.B. aus Makrolon<sup>®</sup>, Acrylglas und Polysulfon sowie Kunstleder – in Einrichtungen des Gesundheitswesens

Wirksamkeiten (hohe Belastung)		
<b>Bakterien / Pilze</b>		
Bakterizid / levurozid	VAH	5 Min.
	EN 13727 / EN 13624 / EN 16615	2 Min.
Tuberkulozid / mykobakterizid	EN 14348 / EN 16615	60 Min.
<b>Viren</b>		
Begrenzt viruzid	EN 14476 / EN 16615**	2 Min.
Begrenzt viruzid PLUS	EN 14476 / EN 16615**	2 Min.
Viruzid	EN 14476 / EN 16615**	2 Min.

\* Sofern Infektions- und Arbeitsschutz dies zulassen

\*\* Modifizierter 4-Felder Test

### Medizinischen Geräten und Inventar, wie:

- Displays und Tastaturen bzw. Bedienfelder empfindlicher mobiler und stationärer medizinischer Geräte, z.B. Überwachungsmonitore
- empfindliche nicht invasive Medizinprodukte, z.B. Mammografiegeräte, OP-Lampen

### Wirksamkeit

Bakterizid, levurozid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), begrenzt viruzid PLUS, viruzid.

# Bacillo® Zero Tissues



## Anwendung

Oberflächen mit den Bacillo® Zero Tissues sorgfältig abwischen. Auf vollständige Benetzung achten, damit der optimale Desinfektionserfolg gewährleistet ist. Aufgrund ihrer Zusammensetzung können die Bacillo® Zero Tissues auch ohne Handschuhe eingesetzt werden, sofern Infektions- und Arbeitsschutz dies zulassen.

## Desinfizierbare Fläche (pro Tissue)

- 100 Tissues (17 x 20 cm): 1,5 m<sup>2</sup>
- 160 Tissues (18 x 20 cm): 1 m<sup>2</sup>
- 80 Tissues XL (20 x 30 cm): 2 m<sup>2</sup>

Nach Gebrauch Tissue der Abfallsorgung zuführen.

Um das vorzeitige Austrocknen der Tücher zu verhindern, Tücherverpackung direkt nach Gebrauch wieder verschließen.

Keine Desinfektionsmittellösung in das Innere elektrischer Geräte gelangen lassen. Die Angaben des Geräteherstellers sind zu beachten.

Zur einmaligen Verwendung.

Bei Produktwechsel ist eine Zwischenreinigung durchzuführen.

## Haltbarkeit

In geöffnetem und wieder fest verschlossenem Flowpack: 3 Monate.

## Zusammensetzung

(+)-Weinsäure mit 5 mg/g und Natriumbenzoat mit 5 mg/g

## Listung

VAH, IHO-Desinfektionsmittelliste

## Chemisch-physikalische Daten

Die Angaben beziehen sich auf die

Tränkflüssigkeit Bacillo® Zero:

Flammpunkt

(DIN EN ISO 3679) nicht entflammbar

Dichte (20 °C) 1 g/cm<sup>3</sup>

pH-Wert (20 °C): 2,1-2,4

## Fachberatung

HARTMANN SCIENCE CENTER

Tel: +49 (0) 40 - 54 00 6 -111

E-Mail: [science-center@hartmann.info](mailto:science-center@hartmann.info)



**Wir forschen für  
den Infektionsschutz**  
[hartmann-science-center.com](http://hartmann-science-center.com)

Produktname	Packungsinhalt	Artikelnummer	PZN	Versand-Einh. Packungen
<b>Bacillo® Zero Tissues</b>	100 Tücher Flowpack Größe 17 x 20 cm	981 935	18662925	6
<b>Bacillo® Zero Tissues Big Pack</b>	160 Tücher Flowpack Größe 18 x 20 cm	981 985	19262145	6
<b>Bacillo® Zero Tissues XL</b>	80 Tücher Flowpack Größe 20 x 30 cm	981 936	19301508	6
<b>Flowpack Wandhalter</b>	1 Wandhalter	981 205	09397045	1
<b>Flowpack-Halter flex</b>	1 Halter	981 899	-	10

Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf wissenschaftlichen Prüfungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Weitergehende Empfehlungen, z. B. im Hinblick auf Materialverträglichkeit, sind nur im Einzelfall gesondert möglich. Unsere Empfehlungen sind unverbindlich und keine Zusicherung. Sie schließen die eigene Prüfung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke nicht aus. Insoweit können wir keine Haftung übernehmen. Diese richtet sich nach unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

*Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.*



Hilft. Pflegt. Schützt.

PAUL HARTMANN AG  
Paul-Hartmann-Straße 12  
89522 Heidenheim  
Deutschland

Tel. +49 (0) 7321-36-0  
Fax +49 (0) 7321-36-36  
[info@hartmann.info](mailto:info@hartmann.info)  
[www.hartmann.info](http://www.hartmann.info)

Hersteller: BODE Chemie GmbH, Melanchthonstraße 27, 22525 Hamburg  
Ein Unternehmen der HARTMANN GRUPPE