



## perform® pro

Pulverförmiges Konzentrat zur Desinfektion und Reinigung von Flächen und Medizinprodukten auf Basis von Aktiv-Sauerstoff

### Unser Plus:

- sehr gute Materialverträglichkeit
- breites Wirkspektrum (viruzid, tuberkulozid, sporizid (*C. difficile*))
- auf Basis von Aktiv-Sauerstoff

### Anwendungsgebiete

perform® pro ist für die Desinfektion von Flächen und Medizinprodukten geeignet. Durch die Weiterentwicklung eines sehr gut etablierten Produkts mit breitem Wirkspektrum und hoher Materialverträglichkeit findet perform® pro Anwendung in allen Krankenhausbereichen. Darüber hinaus wurde das Produkt so weiterentwickelt, dass es auch den aktuellen Anforderungen der Biozidverordnung entspricht.

### Mikrobiologische Wirksamkeit

#### Geringe Belastung

| Wirksamkeit                                                                      | Konzentration | Einwirkzeit        |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| bakterizid / levurozid<br>EN16615, EN13624, EN13727, EN17387                     | 0,5 %<br>1 %  | 60 Min.<br>5 Min.  |
| begrenzt viruzid PLUS<br>EN14476, EN16777                                        | 0,5 %         | 5 Min.             |
| viruzid<br>EN14476, EN16777                                                      | 0,5 %<br>1 %  | 60 Min.<br>5 Min.  |
| tuberkulozid<br>EN14348                                                          | 2 %           | 60 Min.            |
| mykobakterizid<br>EN14348                                                        | 2 %           | 60 Min.            |
| fungizid<br>EN13624, EN17387                                                     | 2 %           | 60 Min.            |
| sporizid ( <i>C. difficile</i> )<br>EN17126, EN17846                             | 1 %<br>3 %    | 60 Min.<br>30 Min. |
| sporizid ( <i>B. cereus</i> , <i>B. subtilis</i> , <i>C. difficile</i> ) EN17126 | 3 %           | 60 Min.            |

#### Hohe Belastung

| Wirksamkeit                                                  | Konzentration | Einwirkzeit       |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| bakterizid / levurozid<br>EN16615, EN13624, EN13727, EN17387 | 1 %<br>3 %    | 60 Min.<br>5 Min. |
| begrenzt viruzid PLUS<br>EN14476, EN16777                    | 1 %           | 5 Min.            |
| viruzid<br>EN14476, EN16777                                  | 1 %<br>3 %    | 60 Min.<br>5 Min. |
| tuberkulozid<br>EN14348                                      | 2 %           | 60 Min.           |
| mykobakterizid<br>EN14348                                    | 2 %           | 60 Min.           |
| fungizid<br>EN13624, EN17387                                 | 3 %           | 60 Min.           |

### Listungen

- zur RKI-Listung angemeldet
- IHO-Liste
- VAH-Zertifikat



## Produktdaten

### Zusammensetzung:

100 g enthalten: 49,5 g

Pentakaliumbis(peroxymonosulfat)bis(sulfat). Enthält:

Dinatriumdihydrogen(1-hydroxyethyliden)bisphosphonat,

Natriumdodecylsulfat, (+)-Weinsäure.

### Chemisch-physikalische Daten

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Farbe                 | weiß                                 |
| Flammpunkt            | Nicht anwendbar                      |
| Form                  | fest Pulver                          |
| pH                    | ca. 3,0 / 20 g/l / 20 °C / in Wasser |
| Viskosität, dynamisch | Nicht anwendbar                      |

## Besondere Hinweise

**Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.** Das Tragen von Handschuhen ist erforderlich. Bei starker Verschmutzung Gebrauchslösung vorzeitig wechseln. Die Gebrauchslösung kann auf sehr empfindliche Textilfarbstoffe bleichend wirken. Verpackung nur vollständig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Füllgutreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden. Für ausreichende Belüftung am Ort des Gebrauchs sorgen. perform® pro ist zudem für die Desinfektion von Atemschutz- und Inhalationsmasken sowie Übungspuppen geeignet. Reinigen Sie die Ausrüstung und das Medizinprodukt gründlich mit Wasser. Oder tauchen Sie zerlegte Teile von Medizinprodukten in die Gebrauchslösung ein. Nach der erforderlichen Einwirkzeit mit Wasser abspülen. Schwerwiegende Vorfälle im Zusammenhang mit dem Produkt sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden. **Ausschließlich für die Verwendung von Fachkräften bestimmt.**

## Anwendungshinweise

Zum Ansetzen der Gebrauchslösung Eimer mit Wasser (max. 30° C) füllen, Produkt hinzugeben und lösen:

- 1 Beutel (40 g) auf 8 l Wasser = 0,5%ige Lösung
- 2 Beutel (80 g) auf 8 l Wasser = 1%ige Lösung

Beim Einsatz der Dose erfolgt eine entsprechende Dosierung gemäß dem Dosen-Etikett. Angesetzte Gebrauchslösungen verfügen über eine Standzeit von 24 Stunden ( $\leq 25^\circ \text{C}$ ) und 4 Stunden ( $\leq 40^\circ \text{C}$ ) über eine gewährleistete Wirkstoffstabilität. Gebrauchslösung bei deutlich sichtbarer Verschmutzung erneuern.

Stellen Sie sicher, dass vor der Desinfektion alle sichtbaren Verschmutzungen entfernt werden. Ausrüstung gut mit Wasser reinigen.

**Flächendesinfektion:** Die Gebrauchslösung in gewünschter Konzentration im 2-Stufen Wisch-Verfahren auf Fußböden ausbringen. Flächen feucht wischen. Zur Vermeidung von Rückstandsbildungen sollte nach dem 2. Wischvorgang nur eine minimale Restfeuchte auf der Fläche verbleiben. BAuA-Nr.: N-110043

## Bestellinformation

| Artikel                    | Lieferform   | Art.-Nr. |
|----------------------------|--------------|----------|
| perform® pro (40 g) Beutel | 60 / Karton  | 70003654 |
| perform® pro (40 g) Beutel | 250 / Karton | 70003655 |
| perform® pro (900 g) Dose  | 4 / Karton   | 70003657 |

## Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

## Gutachten und Informationen

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter [www.schuelke.com](http://www.schuelke.com).

Für individuelle Fragen:  
Application Department  
Telefon: +49 40 52100-666  
E-Mail: [info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

**schülke Hauptsitz**  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt  
Deutschland  
Tel. +49 40 52100-0  
Fax +49 40 52100-318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)