



## Augenspülung zum schnellen Entfernen von Fremdkörpern

Diese Augenspülung ist eine sterile 0,9 %ige Natriumchloridlösung, die Beschwerden lindert und Folgekomplikationen durch Fremdkörper im Auge verhindert.

### PRODUKTFAKTEN & VORTEILE

- Entfernt effektiv Staub, Schmutz und Verunreinigungen aus den Augen
- Einfach zu handhaben - entweder von der verletzten Person selbst oder mit Hilfe
- Flexible Lösungen – Flaschen für den mobilen Einsatz und Stationen für die Wandmontage
- Breites Anwendungsspektrum - von Industriearbeitsplätzen bis hin zu Labors und Erste-Hilfe-Sets
- Hohe Funktionssicherheit - Flaschen entsprechen EN 15154-4
- CE-Kennzeichnung gemäß den Richtlinien zur Klassifizierung der MDD 93/42/EWG
- Haltbarkeit von 3,5 Jahren bei versiegelten Flaschen



Die Produkte sind gemäß Leitfaden zur Klassifizierung der Medizinprodukte-Richtlinie (93/42/EWG) mit der CE-Kennzeichnung versehen.

### KONTAKT

info@plum-deutschland.de  
+49 4721 681801

# Kombinieren Sie Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride mit Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate an Arbeitsplätzen wo ein Unfallrisiko mit Chemikalien besteht

Informieren Sie sich über Ihre Chemikalien und sorgen Sie für die passende Erste Hilfe.

Welche Augenspülung erforderlich ist, liegt an der Unfallursache. Zuerst muss festgestellt werden, ob ein Fremdkörper oder eine Säure aus dem Auge entfernt werden muss - und wenn möglich, welchen pH-Wert die jeweilige Lösung hat.

Wenn der pH-Wert entweder stark sauer oder alkalisch ist, spülen Sie zuerst mit Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate, bis die Flasche leer ist. Entsorgen Sie die Flasche und spülen Sie mit der Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride weiter, bis Sie einen Arzt oder die Notaufnahme erreichen.

Ist der pH-Wert neutral, spülen Sie mit Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride, bis die Flasche leer ist. Entsorgen Sie diese anschließend.



4921 - Plum iBox 2 mit  
200 ml Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate  
und 500 ml Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride

## ERGONOMISCHER AUGENAUFSATZ

Die Form der Augenaufsätze helfen dabei, die richtige Flüssigkeitsmenge und Spülzeit sicherzustellen. Drücken Sie die Flasche leicht zusammen, um einen weichen und angenehmen Strahl zu erzeugen.

### AUGENAUFSATZ



Flexibler, ergonomischer Augenaufsatz, der das Augenlid während des Gebrauchs offen hält

### DUO AUGENAUFSATZ



Flexibler, ergonomischer Augenaufsatz, der das gleichzeitige Spülen beider Augen ermöglicht

## VERFÜGBARE GRÖSSEN

| Art.-Nr.   | AUGENAUFSATZ | 4691        | 4604        | 4707        | DUO AUGENAUFSATZ | 4861       | 4800        |
|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------------|
| Inhalt     |              | 200 ml      | 500 ml      | 1000 ml     |                  | 500 ml     | 1000 ml     |
| Verpackung |              | 10 x 200 ml | 12 x 500 ml | 6 x 1000 ml |                  | 6 x 500 ml | 6 x 1000 ml |

### KONTAKT

info@plum-deutschland.de  
+49 4721 681801